




LLC. HTL-Advansys  
ООО «Эйч Ти Эль-Адвансис»

## РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

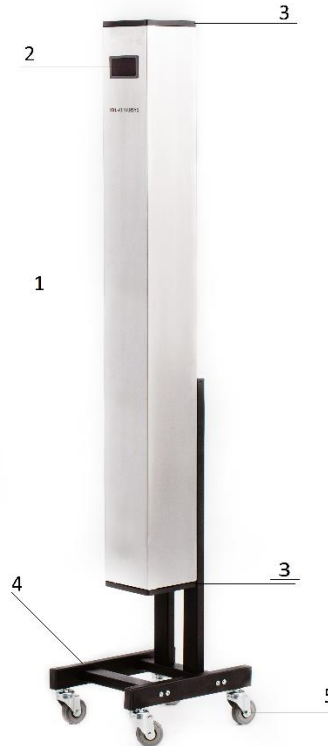

Состав прибора:

1. Корпус с реакторной камерой
2. Моточасы выработки ламп
3. Защитные решетки с фильтрующим элементом
4. Мобильная стойка
5. Колесные опоры мобильной стойки

Порядок обслуживания прибора пользователем:

1. Обязательная ежедневная очистка деталей номер 1 и 5 спиртосодержащим чистящим средством для окон с использованием микрофибры.
2. Ежедневная очистка детали номер 5
3. Ежедневная очистка детали номер 3 с использованием вакуумной техники (пылесоса) с щеткой для очистки мелких поверхностей и углов.
4. Рекомендуется ежемесячная очистка фильтрующих элементов детали номер 3 с использованием проточной воды. (Проводится только квалифицированным специалистом). Механическое повреждение защитной решетки не является гарантийным случаем.